


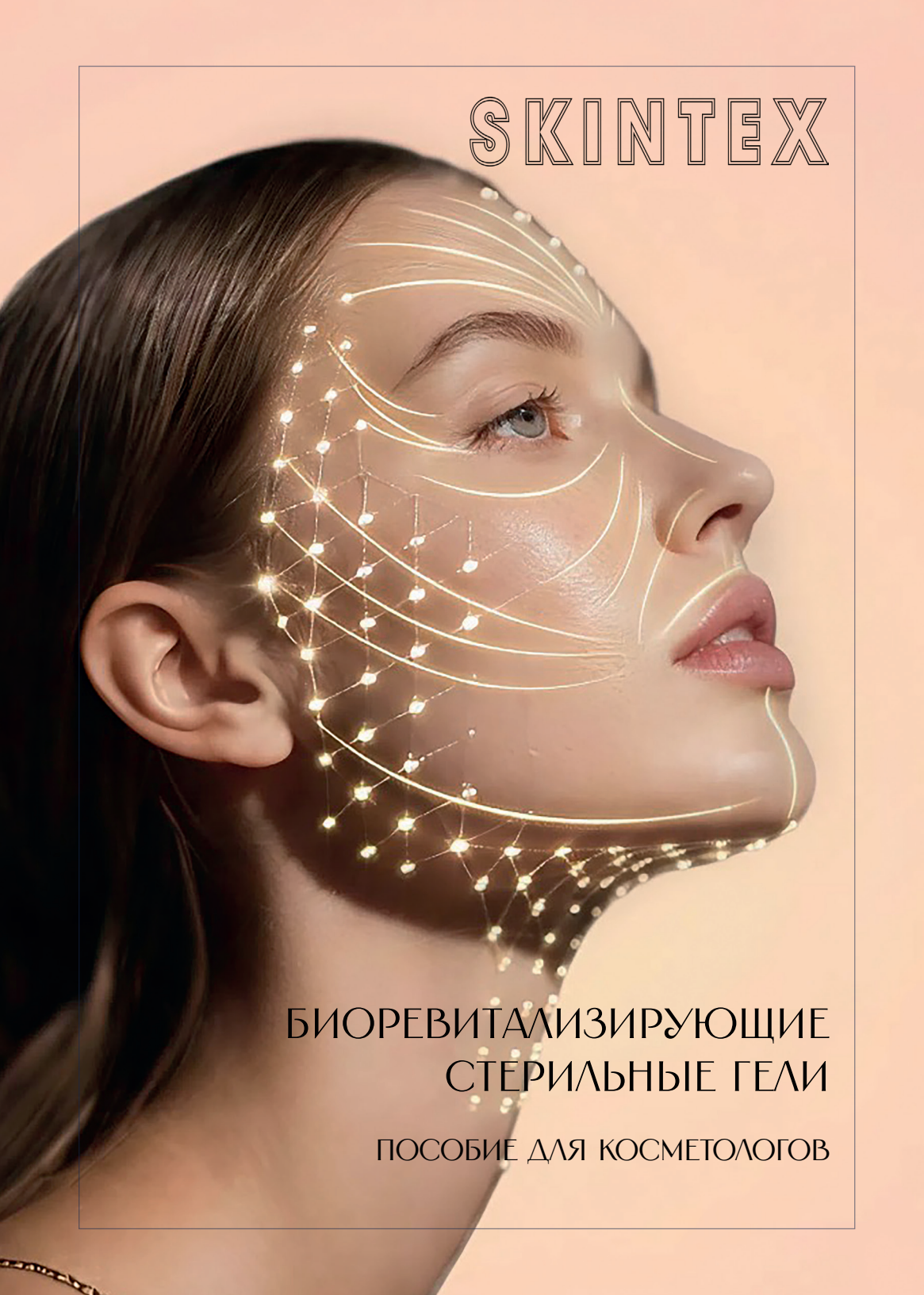

SKINTEX

БИОРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ ГЕЛИ

ПОСОБИЕ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ


КОРРЕКЦИЯ АКНЕ

БОРЬБА
С ВОЗРАСТНЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ

УСТРАНЕНИЕ
ПИГМЕНТАЦИИ

УМЕНЬШЕНИЕ
РОЗАЦЕА

ЛИФТИНГ
ЭФФЕКТ

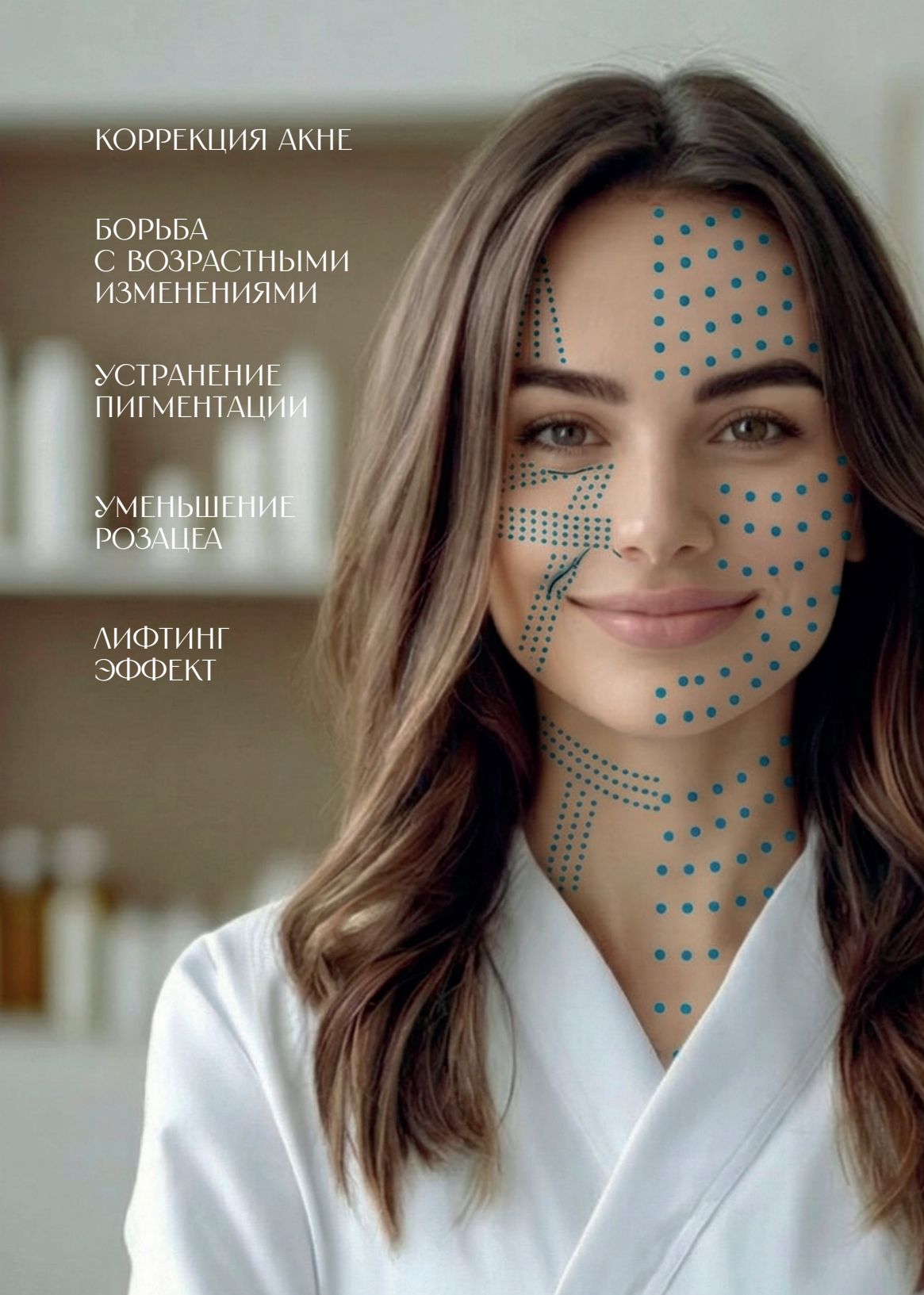

SKINTEX

CAPILLARY



ENERGY



FIBRO



PROLIFT



AMINO



NUCLEO



SKINOLIFT



MAGNIL 1500



MIODERM



KREMNI PRO



“ БИОРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ ГЕЛИ SKINTEX —
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ! ”

СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 1,5%
- Трегалоза — 1,1%

ТРЕГАЛОЗА

- Обладает цитопротекторными свойствами — поддерживает жизнь клеток при неблагоприятных, стрессовых условиях
- Стабилизирует мембраны клеток и липидный барьер кожи, снижая перекисное окисление липидов
- Восстанавливает белки кожи (коллаген, эластин)
- Естественный стабилизатор гиалуроновой кислоты, замедляет ее расщепление гиалуронидазами, что позволяет продлить действие ГК в коже
- Улучшает микроциркуляцию и лимфодренажные функции
- Сохраняет воду в межклеточном пространстве, поддерживает физиологический уровень увлажненности кожи



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Обезвоживание кожи
- Признаки фото- и хроностарения (дряблость, сниженный тонус, морщины, пигментные пятна)
- «Кожа в стрессе»
- Склонность к отёкам, в том числе в периорбитальной области
- Подготовка и реабилитация после агрессивных косметологических процедур (химические пилинги, лазерная шлифовка и др.)

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Пролонгированная гидратация кожи
- Омоложение, разглаживание морщин, улучшение рельефа кожи
- Улучшение микроциркуляции
- Лимфодренаж, уменьшение отечности, в том числе в периорбитальной области
- Повышение устойчивости клеток кожи к воздействию агрессивных факторов внешней среды

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (верхняя треть, средняя треть, нижняя треть, периорбитальная область, субментальная область)
- Шея
- Декольте
- Кисти рук

Рекомендуется использовать курсом 4–8 процедур 1 раз в 7–10 дней.



СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 1,5%
- Сукцинат натрия (янтарная кислота) — 1,6%

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

- Основной участник энергопродуцирующих процессов в клетке,
- Нормализует клеточный энергообмен (цикл кребса)
- Оказывает антиоксидантное действие
- Восстанавливает эндотелий сосудов, нормализует микроциркуляцию и лимфоотток

- Снижает производство гистамина, а значит, симптомы воспалительных и аллергических реакций

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Гиперпигментация
- Купероз
- Темные круги и отечность периорбитальной области
- «Кожа в стрессе», кожа курильщика
- Обезвоживание кожи
- Возрастные изменения кожи
- Подготовка и реабилитация после агрессивных косметологических процедур (химические пилинги, лазерная шлифовка и др.)

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Восстановление энергетического обмена в клетках
- Антигипоксикантное действие, улучшение оксигенации тканей
- Антиоксидантное действие
- Осветление, сияние кожи
- Восстановление гидрорезерва, увлажнение кожи
- Омоложение, улучшение рельефа

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (верхняя треть, средняя треть, нижняя треть, периорбитальная область, субментальная область)
- Шея
- Декольте
- Кисти рук

Рекомендуется использовать курсом 4–8 процедур 1 раз в 7–10 дней.

СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 1,8%
- Цинка глицинат — 0,002%

ЦИНК

- Участвует в работе около 200 ферментов, ответственных за самый широкий спектр биохимических реакций в организме:
- Нормализует метаболические процессы в тканях
- Регуляция деления и созревания клеток (процессы роста и развития, заживление ран)
- Иммуномодулирующее действие и подавление воспалительных процессов
- Стимулирует работу фибробластов
- Проявляет антиандрогенные свойства, т. к. способен вызывать модуляцию 5 α -редуктазы



ГЛИЦИН

- Аминокислота, являющаяся основным структурным элементом полипептидных цепей (α -спиралей) коллагена.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Возрастные изменения кожи (деформация овала лица, дряблость, морщины)
- Пролонгирование эффекта процедур контурной пластики, ботулотоксина
- Комплексная терапия атрофических рубцов
- Жирная кожа: расширенные поры, повышенная жирность в Т-зоне
- В комплексных программах коррекции фигуры (восстановление тонуса кожи после уменьшения объема подкожно-жировой клетчатки)
- Подготовка и реабилитация после агрессивных процедур

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Лифтинг и уплотнение кожи с антиоксидантным действием
- Уменьшение глубины морщин
- Восстановление гидрорезерва, увлажнение кожи
- Уменьшение возрастных изменений овала и гравитационного птоза
- Профилактика возрастных изменений овала и гравитационного птоза
- Себорегуляция
- Противовоспалительный эффект

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (верхняя треть, средняя треть, нижняя треть, периорбитальная область, субментальная область)
- Шея
- Декольте
- Кисти рук
- Тело (кожа живота, бедра, ягодиц, надколенной области)

Рекомендуется использовать курсом 4–8 процедур 1 раз в 7–10 дней.



СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 1,5%
- ДМАЭ — 2,1%

ДМАЭ

- Диметиламиноэтанол — органическое вещество,
- в небольшом количестве присутствует в организме человека:
- Обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект за счет сокращения актиновых филаментов цитоскелета фибробластов и миофибробластов дермы

- Отвечает за выработку нейромедиатора ацетилхолина — активатором многих протекающих в организме процессов, в том числе сокращения и тонуса мышц
- Обладает антиоксидантным действием
- Расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Деформационные изменения овала лица
- Возрастные изменения кожи (дряблость, морщины, сниженный тонус)
- Обезвоживание кожи
- Снижение тонуса, дряблость кожи (лифтинг-эффект)
- Тусклый, уставший цвет лица

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Лифтинг, уменьшение проявлений гравитационногоптоза мягких тканей
- Уменьшение возрастных изменений, деформации овала лица
- Омоложение, уплотнение кожи
- Восстановление гидрорезерва, увлажнение кожи
- Антиоксидантное действие
- Осветление, сияние кожи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (средняя и нижняя треть, субментальная область)
- Тело (внутренняя поверхность плеча, кожа живота, бедра, ягодиц, надколенной области)
- * не вводить в периорбитальную область.

Рекомендуется использовать курсом 4–6 процедур 1 раз в 7–10 дней.

СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 1,5%
- Маннитол — 0,8%
- Аминокислоты (глицин, аланин, валин, глутаминовая кислота)
- Коллоидное серебро — 0,01%

АМИНОКИСЛОТЫ

- Участвуют в построении полипептидных цепей (α-спиралей) коллагена

МАННИТОЛ

- Антиоксидант, замедляет распад гиалуроновой кислоты в тканях, способствуя ее более длительному действию



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Возрастные изменения кожи (деформация овала лица, дряблость, морщины)
- Обезвоживание кожи
- Комплексная терапия атрофических рубцов
- В комплексных программах коррекции фигуры (восстановление тонуса кожи после уменьшения объема подкожно-жировой клетчатки)
- Подготовка и реабилитация после агрессивных косметологических процедур (химические пилинги, лазерная шлифовка и др.)

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Омоложение, уплотнение кожи
- Уменьшение глубины морщин
- Восстановление гидрорезерва, увлажнение кожи
- Уменьшение глубины атрофических рубцов, выравнивание рельефа кожи
- Восстановление тонуса кожи после коррекции фигуры
- Подготовка и реабилитация после агрессивных косметологических процедур

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (верхняя треть, средняя треть, нижняя треть, периорбитальная область, субментальная область)
- Шея
- Декольте
- Кисти рук
- Тело (кожа живота, бедра, ягодиц, надколенной области, внутренняя поверхность плеча)

Рекомендуется использовать курсом 4–8 процедур 1 раз в 7–10 дней.



СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 1,5%
- ПДРН — 2%

ПДРН (ПОЛИДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОТИДЫ)

- Являются субстратами для репарации собственной ДНК клеток
- Стимулируют синтез коллагена фибробластами дермы
- Обладают иммуномодулирующим действием
- Нормализуют меланогенез
- Защищают ДНК клеток от повреждения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Возрастные изменения кожи (деформация овала лица, дряблость, морщины)
- Комплексная терапия атрофических рубцов
- Гиперпигментация
- Обезвоживание кожи
- Подготовка и реабилитация после агрессивных косметологических процедур (химические пилинги, лазерная шлифовка и др.)

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Уменьшение глубины морщин
- Восстановление гидрорезерва, увлажнение кожи
- Осветляющее действие
- Нормализация меланогенеза
- Уменьшение глубины атрофических рубцов, выравнивание рельефа кожи
- Противовоспалительное, иммуномодулирующее действие
- Подготовка и реабилитация после агрессивных процедур

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (средняя и нижняя треть, области мимических морщин и складок, периоральная область, субментальная область)
- Шея
- Декольте
- Кисти рук

Рекомендуется использовать курсом 4–6 процедур 1 раз в 7–14 дней.

SKINOLIFT

СКИНОЛИФТ

ЖИДКИЕ НИТИ

SKIN

СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 1,5%
- Цинка хлорид — 0,02%

ЦИНКОВАЯ СОЛЬ

- В препарате присутствует в виде взвеси, что уплотняет дерму и дает выраженный лифтинг-эффект



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Деформация овала лица
- Возрастные изменения кожи (дряблость, морщины)
- Носогубные складки, морщины «марионетки», «кисетные» морщины, «кольца Венеры»
- Армирование средней и нижней трети лица
- Комплексная терапия атрофических рубцов
- В комплексных программах коррекции фигуры (восстановление тонуса кожи после уменьшения объема подкожно-жировой клетчатки)

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Значительное уменьшение проявлений гравитационного птоза
- Выравнивание овала лица
- Устранение мелких морщин
- Сглаживание глубоких морщин и складок
- Уменьшение глубины атрофических рубцов, выравнивание рельефа кожи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (средняя и нижняя треть, области мимических морщин и складок, периоральная область, субментальная область)
- Шея
- Декольте
- Тело (внутренняя поверхность плеча, кожа бедра, ягодиц, надколенная область, локти)

Рекомендуется использовать курсом 2–5 процедур 1 раз в 10–14 дней.



СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 1,5%
- Магния хлорид — 0,015%

МАГНИЙ

- Участвует в синтезе >700 белков в организме, в том числе коллагена соединительной ткани
- Антиоксидант (необходим для синтеза глутатиона — одного из основных антиоксидантов организма)
- Антигипоксикант
- Оказывает противовоспалительное действие
- Участвует в процессах передачи сигналов от рецепторов в клетку (нормализация метаболических процессов)
- Улучшение синаптической передачи сигналов (нейротрансмиссия)
- Активизирует энергетический обмен (образование и стабилизация АТФ, метаболизм глюкозы)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Возрастные изменения кожи (дряблость, морщины, деформация овала лица)
- Кожа с признаками купероза, розацеа
- Кожа «в стрессе»
- Атрофические рубцы
- Подготовка кожи к агрессивным косметологическим процедурам (химические пилинги, лазерная шлифовка, RF-лифтинг, УЗ-SMAS-лифтинг)
- Подготовка к введению препаратов-коллагеностимуляторов
- Восстановление тонуса кожи тела после уменьшения объема ПЖК

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Разглаживание морщин, уменьшение глубины средних и глубоких морщин
- Восстановление гидрорезерва, пролонгированное увлажнение кожи
- Лифтинг и уплотнение кожи
- Антиоксидантное и осветляющее действие
- Уменьшение покраснений, эритемы
- Улучшение рельефа кожи, сглаживание атрофических рубцов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (верхняя треть, средняя треть, нижняя треть, периорбитальная область, субментальная область)
- Шея
- Декольте
- Кисти рук, внутренняя поверхность плеча, локти
- Кожа живота, бедра, ягодиц, надколенной области

Рекомендуется использовать курсом 3–5 процедур 1 раз в 7–10 дней.

СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 1,5%
- Аргирелин — 0,05%

АРГИРЕЛИН

- Гексапептид — миорелаксант, блокирует мышечную иннервацию за счет конкурентного ингибирования белков, ответственных за процесс проведения нервного импульса, при этом не является токсином.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Мимические морщины периорбитальной области («гусиные лапки»), межбровья, лба, периоральной области («кисетные морщины»), шеи и декольте
- Сниженный тонус, дряблость кожи
- Пролонгирование эффекта ботулотоксина

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Разглаживание мелких морщин, уменьшение глубины средних и глубоких морщин
- Профилактика появления новых морщин
- Восстановление гидрорезерва, пролонгированное увлажнение кожи
- Лифтинг и уплотнение кожи
- Улучшение рельефа кожи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (лоб, межбровье, периорбитальная зона («гусиные лапки»), периоральная зона («кисет»))
- Шея
- Декольте

Рекомендуется использовать курсом 3–5 процедур 1 раз в 7–10 дней.



СОСТАВ

- Гиалуроновая кислота нативная, биосинтетическая, высокомолекулярная (1,5–2,5 млн. Да) — 2,0%
- Кремний органический (силикат натрия) — 0,025 мг/мл

КРЕМНИЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ

- Играет важную физиологическую роль в выработке основных компонентов соединительной ткани — способствует регенерации коллагеновых и эластиновых волокон
- Активизирует синтетическую активность фибробластов

- Положительно влияет на состояние сосудистой стенки и систему микроциркуляции, улучшает трофику тканей
- Антиоксидантное действие, блокирует окисление липидов и образование свободных радикалов, предотвращает преждевременное старение кожи

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Фото- и хроностарение кожи
- Сниженный тонус, дряблость кожи
- Стрии

- Атрофические рубцы постакне
- Кожа с признаками купероза, розацеа
- Восстановление тонуса кожи тела после уменьшения объема подкожно-жировой клетчатки

ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Восстановление гидрорезерва, пролонгированное увлажнение кожи
- Лифтинг и уплотнение кожи
- Улучшение рельефа кожи
- Разглаживание мелких морщин, уменьшение глубины средних и глубоких морщин
- Уменьшение эритемы, выравнивание тона кожи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лицо (верхняя треть, средняя треть, нижняя треть, периорбитальная область, субментальная область)
- Шея
- Декольте
- Кисти рук, внутренняя поверхность плеча, локти
- Кожа живота, бедра, ягодиц, надколенной области

Рекомендуется использовать курсом 3–5 процедур 1 раз в 7–10 дней.

SKINTEX

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ



MIODERM




PROLIFT




AMINO




SKINOLIFT

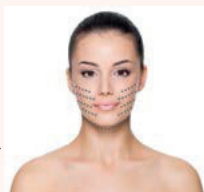

CAPILLARY
ENERGY
NUCLEO

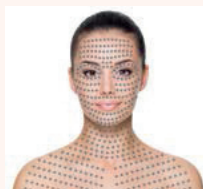

FIBRO
MAGNIL 1500
KREMNI PRO

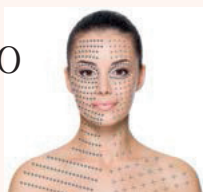

SKINTEX

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A large, light blue curved wall features a large, semi-circular orange recessed display area. Inside this area, four horizontal shelves are illuminated from below, showcasing a variety of SKINTEX skincare products. The products include boxes and jars in shades of green, orange, purple, blue, pink, and grey. To the left of the main display, a vertical stack of similar shelves is partially visible, also filled with SKINTEX products.

SKINTEX

Компания «Ля ботэ медикаль»
г. Москва, ул. Маршала Мерецкого, д. 3
Тел.: +7 (495) 644 54 11, +7 (963) 996 39 08
info@lbm.moscow - la-beaute-medicale.ru